

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|---|
|  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | OKSİJEN TÜPÜ KULLANMA TALİMATI | | |  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
| Kodu TY.TL.01 | Yayın tarihi 25.07.2017 | Revizyon No 01 | Revizyon tarihi 24.11.2023 | Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1 |

1.AMAÇ: oksijen tüpünün doğru kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: Doktor, hemşire ve acil tıp teknisyenlerini kapsar.

3.KISALTMALAR: -----

4.TANIMLAR: -----

5.SORUMLULAR: Başhekim, Başhemşire, Sorumlu Doktor, Sorumlu Hemşire

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1. Oksijen Flowmetresi Oksijen tüpüne takılır

6.2. Oksijen tüpünün vanası açılır

6.3. Flowmetre nemlendirme kabındaki distile su seviyesi kontrol edilir

6.4. Oksijen maskesi hastaya bağlanır

6.5. Flowmetre ayar düğmesinden oksijen miktarı ayarlanır

6.6. Hastaya oksijen verme işlemi bittikten sonra vana kapatılır

6.7. Oksijen tüpü manometresinden tüp oksijen miktarı kontrol edilir.

6.8. Oksijen tüpü bitmişse değiştirilir, kullanıma hazır halde bırakılır

6.9. Günlük olarak tüpün doluluk oranı kontrol edilir.

6.10. Oksijen tüpü ventillerini yağlı el ile kesinlikle açıp kapamayınız. Ventil aksamına hiçbir şekilde yanıcı özellikli maddeleri yaklaştırmayınız.

6.11. Ventil ve aksamını kesinlikle kendiniz değiştirmeyiniz.

6.12. Tüpleri kullanırken veya naklederken kesinlikle kapaksız olmamalı, sert bir darbeye maruz bırakılmamalı.

6.13. Dolu tüpleri sıcaklık değişmelerine, güneş ışınlarına ve radyasyon ışınlarına karşı koruyunuz.

6.14. Tüpleri bekletirken veya kullanırken daima dik tutunuz.

6.15. Tüp içerisindeki gazı tamamen kullandıktan sonra ventili sıkıca kapatınız ve tüp başlığını vidalayınız.