

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	OKSİJEN TÜPÜ KULLANMA TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu TY.TL.01	Yayın tarihi 25.07.2017	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 24.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

1.AMAÇ: oksijen tüpünün doğru kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: Doktor, hemşire ve acil tıp teknisyenlerini kapsar.

3.KISALTMALAR: -----

4.TANIMLAR: -----

5.SORUMLULAR: Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Sorumlu Hemşire

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1. Oksijen Flowmetresi Oksijen tüpüne takılır

6.2. Oksijen tüpünün vanası açılır

6.3. Flowmetre nemlendirme kabındaki distile su seviyesi kontrol edilir

6.4. Oksijen maskesi hastaya bağlanır

6.5. Flowmetre ayar düğmesinden oksijen miktarı ayarlanır

6.6. Hastaya oksijen verme işlemi bittikten sonra vana kapatılır

6.7. Oksijen tüpü manometresinden tüp oksijen miktarı kontrol edilir.

6.8. Oksijen tüpü bitmişse değiştirilir, kullanıma hazır halde bırakılır

6.9. Günlük olarak tüpün doluluk oranı kontrol edilir.

6.10. Oksijen tüpü ventillerini yağlı el ile kesinlikle açıp kapamayınız. Ventil aksamına hiçbir şekilde yanıcı özellikli maddeleri yaklaştırmayınız.

6.11. Ventil ve aksamını kesinlikle kendiniz değiştirmeyiniz.

6.12. Tüpleri kulanırken veya naklederken kesinlikle kapaksız olmamalı, sert bir darbeye maruz bırakılmamalı.

6.13. Dolu tüpleri sıcaklık değişmelerine, güneş ışınlarına ve radyasyon ışınlarına karşı koruyunuz.

6.14. Tüpleri bekletirken veya kullanırken daima dik tutunuz.

6.15. Tüp içerisindeki gazı tamamen kullandıktan sonra ventili sıkıca kapatınız ve tüp başlığını vidalayınız.