



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

BUHAR STERİLİZATÖR KULLANIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
SH.TL.13

Yayın tarihi
23.10.2023

Revizyon No
01

Revizyon tarihi
10.11.2023

Sayfa No / Sayfa Sayısı
1 / 2

1.AMAÇ

Cihazın doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

2.KAPSAM

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları ve sorumlusu

3.UYGULAMA:

- Sol 1 olan cihazın start tuşuna basarak, Sağ 2 olan cihazın açma anahtarı sağa çevrilerek cihaz açılmalıdır.
- Cihaz yaklaşık 15-20 dakika sonra ısınır ceket manometresi 3 bar olduğunda cihaz çalışmaya hazırdır.
- Haftanın belirlenen gününde (ilk günü) ilk döngü öncesi Leak (kaçak) testi yapılmalıdır.
- Her gün her cihaz için ilk yük Bowie - Dick testi olmalıdır.
- Test olumlu ise paketli malzemeler cihaza kâğıt yüzey plastik yüzeye gelecek şekilde, set ve bohçalar arasında buhar geçişine izin verecek şekilde boşluk bırakılarak yerleştirilmelidir. Cihaza maksimum %70 dolulukta yükleme yapılmalıdır. Haftanın ilk günü ilk döngüyle birlikte biyolojik indikatör testi de cihaza yerleştirilir.
- Kapı kapatılmalı, ekrandan cihaza yüklenen malzemeye uygun program seçilerek **BAŞLAT** tuşuna basılmalıdır.
- Program bitiminde cihaz alarm verir ve ekranda çıkan **TAMAM** yazısına basılarak program bitirilir.
- Cihaz yazıcı kısmından program basamaklarını, sıcaklık, basınç ve süre parametrelerini gösteren bir çıktı verir. Çıktı incelenerek program problemsiz tamamlandıysa cihazın kapağı açılır.
- Cihazın sıcak olduğu unutulmamalı malzemeler ısıya dayanıklı bir eldiven giyerek çıkarılır.
- Paketleri çıkardıktan sonra cihazın içinde kalıntılar oluşmuş ise mutlaka temizlenmelidir.
- Haftanın ilk günü yapılan biyolojik indikatörü inkübatöre yerleştirilir ve 3 saat sonra sonucu (negative olmalı) kontrol edilmelidir.

Programlar

- Program-- Paketlenmemiş aletler için 134 C /5 dakika sterilizasyon ve 5 dakikalık kurutma
- Program--Paketlenmemiş aletler için 121 C/15 dakika sterilizasyon ve 5 dakikalık kurutma
- Program--Paketlenmiş aletler için 134 C/10 dakika sterilizasyon ve 15 dakikalık kurutma
- Program--Kauçuk malzemeler için 121 C/15 dakika sterilizasyon ve 15 dakikalık kurutma
- Paketlenmiş aletler için 134 C/15 dakika sterilizasyon ve 10 dakika kurutma

Otoklav içindeki malzemeler soğuyunca boşaltılmalıdır. Kontrol sonucu uygun olmayan paketler steril kabul edilmemeli ve Uygunsuzluk raporu ile kayıt altına alınarak birim sorumlusuna bildirilmelidir.



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

BUHAR STERİLİZATÖR KULLANIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
SH.TL.13

Yayın tarihi
23.10.2023

Revizyon No
01

Revizyon tarihi
10.11.2023

Sayfa No / Sayfa Sayısı
2 / 2

UYARI VE ÖNLEMLER

Yüksek sıcaklık ve basınç içeren bir ekipmanla çalışıldığı asla unutulmamalıdır. Cihazın kazan içi basınç 0 (sıfır) olana kapak açılmamalıdır. Cihazın günlük ve haftalık temizliği uygun şekilde yapılmalıdır.

BUHAR STERİLİZATÖRÜ TEMİZLİĞİ

- Otoklav soğukken iç yüzü sıvı deterjanlı suyla ve yüzeyi çizmeyen malzemeler ile temizlenmelidir.
- Temiz su ile durulanmalı ve mutlaka kurulanmalıdır.
- Çember içinde bulunan filtre çıkarılarak yıkanmalı ve tekrar takılmalıdır.
- Drenaj yuvasında tıkanma varsa bol su ile temizlenmelidir.
- Kapı contası haftada bir defa temizliği, haftada 2 defa spreyleme yapılmalı, yırtık ve kopma varsa değiştirilmelidir.
- Haftada bir defa jeneratör drenajı yapılmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan