
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>ÜNİTLERİN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI</b>			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu OH.TL.135	Yayın tarihi 16.02.2018	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 12.12.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/2

## 1.AMAÇ

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki tüm kliniklerde hasta ve personelin hastane enfeksiyonlarından korumak ve hijyenin sürekliliğini sağlamak.

## 2.KAPSAM

Diş ünitelerinin temizliği ve tüm klinik çalışanlarını kapsar.

## 3.KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

**Suction:** Tükürük emici

## 5.SORUMLULAR

- 5.1. Temizlik personeli
- 5.2. Klinik hemşiresi
- 5.3. Stajyer hekim
- 5.4. Enfeksiyon hemşiresi
- 5.5. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

## 6.FAALİYET AKIŞI

- 6.1. Her hastadan sonra üniteli kullanan hekim tarafından Kirli ( kırmızı ) Gösterge paneli çekilir, temizlik görevlisi ünitte kırmızı gösterge panelini görünce temizliğine başlar.
- 6.2. El hijyenini sağlar, Cilt ve mukozayı korumak için önlük, cerrahi maske, gözlük, Eldiven kişisel koruyucu ekipmanlar giyilir.
- 6.3. Kullanılan pet bardak, suction, pamuk, gazlı bez, ısırma kâğıdı, peçete ve kontamine olan tükürüklü – kanlı malzemeler tıbbi atık çöpüne atılır.
- 6.4. Kullanılan atıklar kirli kutularda toplanarak ağzı kapatılır.
- 6.5. Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılır.
- 6.6. Önce reflektör kolu, sonra ünit tablası, hava su spreyi ve tüm başlıklar dezenfektan spreyle ( Hidrojen Peroksit (%0,5)(Cas No: 7722-84-1)\*\*ve tek kullanımlık gazlı bez ile silinir.
- 6.7. Kreşuarların iç yüzeyi ya sodyumla ya da dezenfektan ile fırçalanarak temizlenir, sonra gazlı bez ile silinerek, eldivenler tıbbi atık kovasına atılır.
- 6.8. Ünitteki gösterge paneli temizleme işlemi bittikten sonra Temiz ( Yeşil ) olarak bırakılır.
- 6.9. Gün İçinde ünit temizliği her hastadan sonra yukarıdaki sıralama ile tekrar edilir.
- 6.10. Unit her hastadan sonra yeni hasta almak için hazırlanır, bu işlem yardımcı temizlik personeli, tarafından yapılır.



SELÇUK  
ÜNİVERSİTESİ

Kodu  
OH.TL.135

## ÜNİTLERİN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
2/2

Yayın tarihi  
16.02.2018

Revizyon No  
1

Revizyon tarihi  
12.12.2023

6.11. Gün sonunda, hasta bittikten sonra her yer tam teferruatlı bir şekilde Sodyum Klorür (NaCl) 1/10 oranında sulandırılarak veya ( Hidrojen Peroksit (%0,5)(Cas No: 7722-84-1)\*\* ile, dezenfektan ile temizlenir. Aeratörler ve Mikromotorlar her hastadan sonra kliniklerde temizlik ve dezenfeksiyonu yapılarak merkezi sterilizasyon ünitesine gönderilir.

6.12. İşlem sonlandırıldıktan sonra eldiven tıbbi çöp kovasına atılır, eller yıkanır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
	Kal. Yön. Direkt.	Dekan