

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>KÂĞIT RULO KESME MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI</b>			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu SH.TL.14	Yayın tarihi 06.10.2017	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 10.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

### 1.AMAÇ:

Sterilizasyon işleminde kullanılan kâğıt rulo kesme makinesinin kullanım kriterlerini belirlemektir.

### 2. KAPSAM

Kağır rulo kesme işleminin aşamalarını kapsar.

### 3. KISALTMALAR

-

### 4. TANIMLAR

-

### 5. SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Birimi çalışanları sorumludur.

### 6. FAALİYET AKIŞI

1. Sterilizasyon rulo yuvasına yerleştirilir.

2.Makinenin fişi prize takılır.

3.Önde bulunan kırmızı "AÇMA- KAPAMA" düğmesine basılarak cihaz açılır.

4."Sür" düğmesi kullanılarak sterilizasyon kağıt rulo makine içine sürülür.

5.Cihazın sıcaklığına ulaşması için 3-5 dk. beklenir.

6.İsınan cihaz ekranında

A = İmalat Bilgisi

B = Bilgi Düzelt

C = Manuel İmalat

D = İmalata Başla

Yazıları belirir.

7. A = İmalat Bilgisi tuşuna basılarak sterilizasyon kâğıt rulo boy ayarlaması yapılır. Değerler girildikten sonra kare tuşuna basılarak girilen değerler onaylanır.

8. D= İmalata başla basılarak ayarlanan boyda sterilizasyon kâğıt rulo kesilmeye başlar.

### Sterilizasyon rulo boy değerleri

10-7,5 mm sterilizasyon kağıt rulo boy= 270 mm

Sterilizasyon kağıt rulo tepsi boy= 450 mm

Sterilizasyon kağıt rulo kaşık boy=200 mm

Sterilizasyon kağıt rulo kulak boy=30

<b>Hazırlayan</b>	<b>Kontrol Eden</b> Kal. Yön. Direkt.	<b>Onaylayan</b> Dekan