
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>ANESTEZİYOLOJİ VE ANESTEZİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI</b>			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu AH.TL.145	Yayın tarihi 30.09.2020	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 09.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

**1. AMAÇ:** S.Ü Selçuklu Dış Hekimliği Fakültesi Ameliyathanesindeki Anestezi Cihazının uygun kullanımını sağlamak

**2.KAPSAM (UYGULAMA ALANI):** Anestezi Kliniği

**3.KISATLIMLAR:** ACGO

**4.TANIMLAR:** ACGO ( gaz akışı anahtarı)

**5.SORUMLULAR:** Tüm Anestezi Kliniği Doktor ve Teknikerleri

**6.FALİYET AKIŞI:** Anestezi cihazı kullanımı

**7.İLGİLİ DOKÜMAN:**

### UYGULAMA DETAYI:

#### Sistemi açma

1. Elektrik kablosunu bir duvar prizine takın. Sistem şalterinin açık olduğundan emin olun.

• AC elektrik bağlandığında şebeke gerilimi göstergesi yanar. Batarya henüz tam dolmamışsa, şarj olur.

2. Solunum sisteminin bağlantılarının düzgün olup olmadığını kontrol edin.

Sağ (inspirasyon) port tıkalıyken sistemi açmayın.

3. Sistem düğmesini Açık konumuna getirin.

• Ekranda açılış penceresi görünür.

• Sistem bir dizi otomatik sistem testi yürütür.

4. Günün ilk vakasından önce *Kontrol* menüsündeki *Tüm Kontroller* prosedürünü uygulayın.

#### VENTİLATÖR TESTİ

1. Tam test seçeneğini tıklayın.

2. Atık sistem akışını kontrol edin.

3. Bag/ Vent'i kolunu Vente ayarlayın.

4.ACGO düğmesini devreye ayarlayın.

5. Y konektörünü açın ve onaylayın.

6.Test sonrası Y konektörünü tıkayıp ve onaylayın.

#### VAPARİZATÖR TESTİ

1. Test etmek için vaparizatörleri seçin ve onaylayın.

2. Seçilen vaparizatörü açın ve onaylayın.

3. Test sonrası vaparizatörü açın ve onaylayın.

#### GAZ KONTROLLERİ

1. Tüm gaz akışlarını kapatın.

2. N2o okışının 6 litre/dak'dan yüksek ayarlayın.

3. Test sonrası N2o akışını kapatın.

4. O2 akışını 3 litre dak'dan yüksek ayarlayın.

5. Test sonrası O2 akışını kapatın.

6. Hava akışını 3 litre dak'dan yüksek ayarlayın.

7. Test sonrası HAVA akışını kapatın.

#### DEVRE KAÇAĞI TESTİ

1. 1.Bag/ Vent'i kolunu BAG'A ayarlayın.

2. Apl valfını 30 ile 70 'in orasına ayarlayın.

3. Y konektörünü açın ve onaylayın.

#### Vakayı sonlandırma

1. Bag/Vent düğmesini Bag konumuna getirin.

2. **Vakayı Başlat/Sonlandır** tuşuna basın.

3. **Vakayı şimdi Sonlandır** seçeneğini seçin sistem bekle moduna geçirin.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN Kal. Yön. Direkt.	ONAYLAYAN Dekan
------------	-----------------------------------	--------------------