
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ANESTEZİ CİHAZI VE DOLABI TEMİZLİK TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu AH.TL.146	Yayın Tarihi 30.09.2020	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 09.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 1

1.AMAÇ: Anestezi cihazı ve dolabının temizlik kurallarının belirlenmesi ve ekipmanın sürekli hazır halde tutulması.

2.KAPSAM: Anestezi kliniği

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR: Temizlik talimatı

5.SORUMLULAR: Tüm Anestezi Kliniği Doktor ve Teknikerleri

6.FALİYET AKIŞI: Temizlik talimatı işleyişi

7. İLGİLİ DOKÜMAN:

6.1 Cihaz kapatılır.

6.2 Disposable anestezi devreleri, sodalime kanisteri ve hatları çıkarılır.

6.3 Cihaz üzerinde bulunan kullanılmayacak malzemeler ve ilaçlar imha edilir.

6.4. Sodalime kanisteri, laringoskop blade ve maskeler sterilizasyon için %2'lik DESCOTON solusyonuna konur. 15-25 dk bekledikten sonra bol steril su ile yıkanır. Kurutularak temiz gazlı bez içinde muhafaza edilir.(kullanılmış SODALİME KANİSTERİ dezenfeksiyon için uyanma odasına bırakılır)

6.5. Anestezi cihazı ve kablolar üzerine 30-50 cm mesafeden dezenfektan sıkılır. 1-2 dakika sonra temiz bir bezle silinir.

6.6. Cihazın inspiryum- ekspiryum valfleri uygun şekilde çıkarılır ve dezenfektan sıkılır 1-2 dakika sonra temiz bir bezle silinir. Cihazın arkasında bulunan filtreler su ile temizlenip kurulandıktan sonra yerine yerleştirilir.

6.7.Yeniden kullanılacak malzemeler; her kullanım sonrasında uygun sterilizasyon ve / veya dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan