
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	POŞET KAPATMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu SH.TL.15	Yayın tarihi 06.10.2017	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 10.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

1.AMAÇ

Sterilizasyon işleminde kullanılan paketleme makinesinin kullanım kriterlerini belirlemektir.

2.KAPSAM

Poşet kapama cihazının kullanım aşamalarını kapsar.

3.KISALTMALAR

-

4.TANIMLAR

-

5.SORUMLULAR

Merkezi sterilizasyon ünitesi çalışanları sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1.Cihazın Yerleştirileceği Alan

- Direk güneş ışığına ve yüksek ısıya maruz kalmamalı
- Titreşimli bir alan olmamalı
- Yeterli havalandırmaya sahip olmalı
- Tozsuz bir ortam olmalı

6.2.Cihazın Çalıştırılması

- Cihazın fişi prize takılır.
- Açma kapama tuşuna basınız.
- Cihazın ekranda "düşük ısı lütfen bekleyiniz" ibaresi çıkacaktır.
- Yaklaşık 5 dk. içinde 180 C 'ye ulaşacak ve sesli ikaz verecektir.
- Sesli ikazdan sonra paketlemeye hazırdır.

6.3.Paketleme İşlemi

- Poşet cihazın sol tarafından verilerek sağ tarafından çıkar.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan

