
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>ULTRASONİK CİHAZI KULLANMA TALİMATI</b>			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu SH.TL.16	Yayın tarihi 06.10.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 10.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

### 1.AMAÇ:

Aletler üzerinde bulunan organik atıkların uzaklaştırılmasıdır.

### 2.KAPSAM

Ultrasonik yıkama cihazının kullanım aşamalarını kapsar.

### 3.KISALTMALAR -----

### 4.TANIMLAR -----

### 5.SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon ünitesi çalışanları sorumludur.

### 6. FAALİYET AKIŞI

- Merkezimizde kullanılan cerrahi el aletlerinin en kısa zamanda yıkama ve dezenfeksiyonu sağlanır.
- Cihazın suyu kontrol edilir.
- İçindeki suyun seviyesi cihazın iç tarafındaki çizgiye kadar su doldurulur.
- İçine uygun dezenfektan madde konulur.(Oran kullanılan dezenfektan maddeye göre değişebilir)
- Cihazın ön tarafında bulunan **AÇMA/ KAPATMA** düğmesine basılır.
- Kontrol panelinde sıcaklık, güç ve zaman ayarı bulunmaktadır. Güç (titreşim gücü) ayarlanır.
- Cihazın sıcaklığı kullanılan solüsyon özelliğine göre ayarlanır.
- Uygun sıcaklığa ulaşan cihaz içerisine uygun büyüklükteki sepetlerde yıkanacak aletler cihaz tabanına değmeyecek ve suyun üzerine çıkmayacak şekilde bırakılır.
- Yıkama işlemi bittikten sonra aletler durulanır, kurulama işlemi yapıldıktan sonra, paketleme bölümüne alınır.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan