



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

VİTALOMETRE CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
MC.TL.54

Yayın tarihi
07.12.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
1 / 2

1.AMAÇ

Vitalometre cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5.SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1.1. Cihazın pilleri takılır.

6.1.2. Dişe temas edecek iletken uç cihaza takılır.

6.1.3. Devreyi tamamlayan dudak klipsi hasta ağızına yerleştirilir.

6.1.4. Diş yüzeyine iletkenlik sağlaması amacıyla iletken bir ajan sürülür.

6.1.5. İletken uç diş yüzeyine temas ettirilip cihaz on /off düğmesinden açılır ve kademe kademe güç seviyesi artırılarak vitalite ölçümü yapılır.

6.1.6. İşlem tamamlanınca on/off düğmesinden cihaz kapatılır.

6.1.7. Dudak klipsi hastanın ağızından çıkarılır.

6.1.8. Dudak klipsi, cihazın başlığı ve iletken uç dezenfekte edilir.

6.1.9. Cihazın genel dezenfeksiyonu yapılarak kapatılır.

6.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır.

6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

VİTALOMETRE CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
MC.TL.54

Yayın tarihi
07.12.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
2 / 2

6.2.4.Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3. Vitalometre Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1. Aylık Bakım

6.3.1.1.Genel temizliği yapılır.

6.3.1.2.Çalışması kontrol edilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan