



SELÇUK  
ÜNİVERSİTESİ

# IŞIK TABANCASI CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu  
MC.TL.58

Yayın tarihi  
07.12.2017

Revizyon No  
1

Revizyon tarihi  
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
1 / 3

## 1.AMAÇ

Işık tabancasının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanması.

## 2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

## 3.KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

## 5.SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

## 6.FAALİYET AKIŞI

### 6.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

- 6.1.1. Cihaz güç kaynağına takılır.
- 6.1.2. Kullanılacak maddenin polimerizasyon dozuna göre ilgi güç, çalışma modu ve süresi cihaz üzerinde ayarlanır.
- 6.1.3. Cihaz dişe konulan braketin veya dolgu maddesinin üzerine getirilerek açma - kapama düğmesine basılır.
- 6.1.4. Cihazdan yayılan mavi ışık sönene kadar dişe konulan braketin veya dolgu maddesinin üzerinde tutulur.
- 6.1.5. Diş hekiminin isteğine bağlı olarak ışık tutma işlemi tekrarlanır.
- 6.1.6. İşlem esnasında mavi ışınla direkt göz teması sağlanmamalıdır.
- 6.1.7. İşlem sonrasında cihaz yüzey dezenfektanıyla temizlenir.
- 6.1.8. Cihazın güç kaynağından bağlantısı kesilir.

### 6.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

- 6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
- 6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" ile teknik



SELÇUK  
ÜNİVERSİTESİ

# IŞIK TABANCASI CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu  
MC.TL.58

Yayın tarihi  
07.12.2017

Revizyon No  
1

Revizyon tarihi  
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
2 / 3

servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU "na işler.

6.2.3.Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır. 6.2.4.Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

### 6.3. Işık Tabancası Bakım Talimatı

6.3.1. Aylık Bakım:

6.3.1.1.Fiziki temizliği yapılır.

6.3.1.2.Çalışması kontrol edilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan



SELÇUK  
ÜNİVERSİTESİ

# IŞIK TABANCASI CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu  
MC.TL.58

Yayın tarihi  
07.12.2017

Revizyon No  
1

Revizyon tarihi  
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
3 / 3