

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>ENDO-MOTOR CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI</b>			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu MC.TL.61	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 3

## 1.AMAÇ

Endo-motor cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

## 2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

## 3.KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

## 5.SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

## 6.FAALİYET AKIŞI

### 6.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

- 6.1.1. Açma kapama düğmesinden cihaz hazır konuma getirilir.
- 6.1.2. Ekran açıldıktan sonra cihazın başlığı ile devreyi tamamlayan dudak klipsi birbirine temas ettirilir.
- 6.1.3. Cihazın ekranında "ON" yazısı görüldüğünde dudak klipsi hasta ağızına yerleştirilir.
- 6.1.4. Başlığın ucuna takılan kanal eğesi ile kanal boyu ekranda görünen göstergeye göre tespit edilir.
- 6.1.5. Sırayla kanal eğeleri değiştirilerek kanal genişletme işlemi tamamlanır.
- 6.1.6. Dudak klipsi hastanın ağızından çıkarılır.
- 6.1.7. Dudak klipsi ve cihazın başlığı dezenfekte edilir. Kullanılan kanal eğeleri sterilizasyon ünitesine gönderilir.
- 6.1.8. Cihazın genel dezenfeksiyonu yapılarak kapatılır.

### 6.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

6.2.1. Teknik servis personeli fakültedeki tüm makine ve cihazların fakülte içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

5.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU"

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>ENDO-MOTOR CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI</b>			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu MC.TL.61	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2 / 3

ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU"na işler.

6.2.3.Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.

6.2.4.Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

### 6.3. Endo-Motor Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1. Aylık Bakım:

6.3.1.1.Genel temizliği yapılır.

6.3.1.2.Çalışması kontrol edilir.

<b>Hazırlayan</b>	<b>Kontrol Eden</b> Kal. Yön. Direkt.	<b>Onaylayan</b> Dekan



SELÇUK  
ÜNİVERSİTESİ

# ENDO-MOTOR CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu  
MC.TL.61

Yayın tarihi  
07.12.2017

Revizyon No  
1

Revizyon tarihi  
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
3 / 3