


 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ALGİNATE AUTO-MİXER CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu PL.TL.65	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/2

1.AMAÇ

Talimatın amacı; alginateauto - mixer cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5.SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

- 6.1.1. Cihaz prize takılır.
- 6.1.2. ON düğmesine basılır, cihaz açılır.
- 6.1.3. İstenilen miktarda alginate, alginate kabına konur. Bir miktar su ile karıştırılır.
- 6.1.4. Cihazın üst kapağı açılır, alginate kabı yerine konur. Kapak kapatılır.
- 6.1.5. (+) ve (-) tuşları ile istenilen süre ayarlanır. "START"düğmesine basılır.
- 6.1.6. İşlem tamamlandıktan sonra alginate kabı çıkarılır, ölçü kaşıklarına alginate konur.
- 6.1.7. OFF düğmesine basılır, cihaz kapatılır.

6.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

- 6.2.1. Teknik servis personeli fakültedeki tüm makine ve cihazların fakülte içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
- 6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU"na işler.
- 6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

ALGİNATE AUTO-MİXER CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
PL.TL.65

Yayın tarihi
07.12.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
2/2

6.2.4.Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza fakülte imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3.Alginate Auto- Mixer Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1.Üç Aylık Bakım:

6.3.1.1. Fiziki temizliği yapılır.

6.3.1.2. Çalışması kontrol edilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan

Kalite Yönetim Sistemi Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSÜZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.