



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

TANSİYON ÖLÇME CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
MC.TL.77

Yayın tarihi
07.12.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
1/2

1.AMAÇ

Tansiyon aletinin çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5.SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

6.1.1. Tansiyon aletinin manşonu dirseğin 4 parmak üstüne gelecek şekilde bağlanır.

6.1.2. Dirsekte brachial arterin hissedildiği yere steteskop yerleştirilir.

6.1.3. Steteskopun kulaklıkları kulağa takılır.

6.1.4. Tansiyon aletinin manometresi hastanın durumuna göre yükseltilir.

6.1.5. Tansiyon aletinin hava vidası yavaş yavaş gevşetilir.

6.1.6. İlk duyulan ses büyük son duyulan ses küçük tansiyon olarak kaydedilir.

6.1.7. Tansiyon aletinin manşonu çözülür.

6.2. DİJİTAL TANSİYON ÖLÇME CİHAZI ÇALIŞTIRILMASI

6.2.1. Tansiyon aletinin manşonu dirseğin 4 parmak üstüne gelecek şekilde bağlanır.

6.2.2. Tansiyon cihazının start düğmesine basılır.

6.2.3. Tansiyon cihazının ekranında büyük ve küçük tansiyonu gösteren rakamlar gözükür.

6.2.4. Tansiyon aletinin manşonu çözülür.

6.3. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

6.3.1. Teknik servis personeli fakültedeki tüm makine ve cihazların fakülte içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.3.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU"na işler.



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

TANSİYON ÖLÇME CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
MC.TL.77

Yayın tarihi
07.12.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
2/2

6.3.3.Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.

6.3.4.Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza fakülte imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.4. Tansiyon Aleti Bakım Talimatı

6.4.1. Aylık Bakım:

6.4.1.1 Genel temizliği yapılır. Hava borularında delik veya patlak olup olmadığı kontrol edilir.

6.4.1.2. Hava körüğü kontrol edilir. Subap vidası sıkıştırılır. Kaçak kontrol edilir.

6.4.1.3. İbre hareketi gözlenir. Takılma veya zorlama yapıyor mu gözlenir.

6.4.1.4. Normal bir ölçüm yapılarak cihazın çalışması kontrol edilir.

6.4.1.5. Cihazın pilleri kontrol edilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan