



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

BASINÇLI AKRİL PİŞİRME FIRINI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
PL.TL.79

Yayın tarihi
07.12.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
1/2

1.AMAÇ

Talimatın amacı; basınçlı akril pişirme fırınının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5.SORUMLULAR

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

Kişisel koruyucu önlemler alınarak cihaz çalıştırılır

6.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

6.1.1. Cihazın kapağı açılır, kazana malzeme konularak su ile doldurulur. 5.1.2. Kapak kapatılıp sıkılır.

6.1.3. On/off butonuyla cihaz açılır.

6.1.4. Timer (zaman) ve termi(ısı) kademesi uygun kademeye ayarlanır.

6.1.5. "Start" butonuna basılarak çalıştırılır.

6.1.6. Cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar, kompresör yeterli basınca ulaşınca stop eder. Rezistans devreye girerek suyun istenilen derecede ısıtma işlemine tabi tutar. Su yeterli ısıya ulaştıktan sonra timerdan ayarlanan süre boyunca dijital ekrandan geri sayım yapılır. Bu süre boyunca basınç ve ısı sabit tutulur, geri sayım bitince su ve hava tahliye olur.

6.1.7. İşlem sona erince kapak açılarak malzeme cihazdan alınır.

6.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

6.2.1. Teknik servis personeli fakültedeki tüm makine ve cihazların fakülte içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU"na işler.

6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" doldurur ve teknik servis



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

BASINÇLI AKRİL PİŞİRME FIRINI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
PL.TL.79

Yayın tarihi
07.12.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
2/2

görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.

6.2.4.Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza fakülte imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3.Basınçlı Akri1 Pişirme Fırını Bakım Talimatı

6.3.1.Aylık Bakım:

6.3.1.1. Fiziki temizliđi yapılır.

6.3.1.2. Çalışması kontrol edilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan