
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ELEKTROKOTER CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu MC.TL.85	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/2

1.AMAÇ

Elektrokoter cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2.KAPSAM

Bu talimat, teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5.SORUMLULAR

Teknik bakım onarım birimi çalışanları ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

6.1.1. Elektrokoter cihazının kablolarının yeterli uzunlukta olup olmadığı ve bağlantılarının doğruluğu kontrol edilir, cihazın fişi 220w topraklı prize takılır.

6.1.2. Elektrokoter cihazının plağını hastanın ekstremitelerinin (kol ya da bacağına) metal ile temas edip edilmediği kontrol edilir, metal ile temas etmemelidir. Emin olduktan sonra koter plağı hastanın uygun olan ekstremitesine dispozl plak kullanılıyorsa yapıştırılır. Rezibl plak kullanılıyor ise plağı ekstremitte ile temas edecek şekilde yerleştirilir ve hastanın ekstremitesini oynatma, kaldırma riskine karşı sabitlenir, bağlanır.

6.1.3. Koter plağı uygulanacak bölge kıllı ise kıldan arındırılmalıdır.

6.1.4. Hastanın altında sıvı birikmesini önleyecek tedbirler alınır, sıvı birikebilecek ameliyatlarda hasta altı bezi kullanılır.

6.1.5. Odanın nem oranının % 50 seviyesinde olmasını kontrol edilir.

6.1.6. Kullanılan ünipolarkoter ise 3'lü girişe, bipolar koter ise koter ucunu 2'li girişe yerleştirilir.

6.1.7. "Start" düğmesine basılır ve cerrahın istediği dereceye göstergesi ayarlanır.

6.1.8. Son kontrolleri yaparak cihazı kullanıma hazır hale getirilir.

5.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

6.2.1. Teknik servis personeli fakültedeki tüm makine ve cihazların fakülte içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

ELEKTROKOTER CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
MC.TL.85

Yayın tarihi
07.12.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
03.06.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
2/2

FORMU" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU "na işler.

6.2.3.Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.

6.2.4.Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza fakülte imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3.Elektrokoter Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1.Aylık Bakım:

6.3.1.1. Cihazın genel temizliği yapılır.

6.3.1.2. Cihazın çalışması kontrol edilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan

Kalite Yönetim Sistemi Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSÜZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.